



**MEDITEX<sup>®</sup>**

Medizinische Funktionswäsche

# Produktübersicht



**MEDITEX<sup>®</sup>** zieht Patienten einfach an.



## Passgenaue Funktionskleidung – ein Gewinn für Patient und Personal

Die Behandlung von Patienten z.B. bei der Dialyse, in der Onkologie oder auch von Frühchen unterliegt hohen hygienischen Standards.

MediTex® hat speziell für diese Patientengruppen funktionelle Kleidung mit entsprechenden wiederverschließbaren Öffnungen entwickelt.

War bisher die Durchführung der Behandlung für das Personal oft umständlich und für den Patienten mit Unannehmlichkeiten verbunden, ist nun ein rasches hygienisches Anbringen und Kontrollieren verschiedener medizinischer Zugänge möglich.

Der Patient muss nicht entkleidet werden, bleibt während der Behandlung warm und in seiner Intimität bewahrt.

Speziell eingearbeitete Taschen und Schlaufen ermöglichen auch ein hygienisches Verstauen von medizinischem Zubehör z.B. Sonden und Katheter.

Die Verschlussmechanismen an der Kleidung, wie Knöpfe, Schlaufen, Magnete oder Reißverschlüsse, sind in ihrer Funktionalität an die verschiedenen Behandlungsvorgänge angepasst.





## MediTex® zieht Patienten einfach an.



MediTex® verfügt über eine umfassende Kollektion zu verschiedenen Schwerpunktindikationen. In Zusammenarbeit mit Kliniken und Branchenvertretern ist MediTex® stets bemüht, an Innovationen und Weiterentwicklungen zu feilen, sodass die bestehende Kollektion um spezialisierte Kleidungsstücke ergänzt wird. Die Meinung aus der Praxis ist MediTex® ein besonderes Anliegen, da nur durch den direkten Austausch der Bedarf des Personals und die Bedürfnisse der Patienten erkannt und in den Fokus der Produktentwicklung gestellt werden können.

Mit der MediTex® Kleidung können medizinische Einrichtungen einen Standardisierungsprozess einführen und dabei Risiken, Kosten und Behandlungsdauer minimieren.

Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite wie dieser Prozess bei Ihnen individuell aussehen kann!

Schwerpunktmäßige Entwicklung von Bekleidung für folgende Indikationen:

- Onkologie
- Kardiologie
- Ernährungstherapie
- Dialyse
- Pädiatrie / Neonatologie
- Pflege



## Funktionswäsche für die Ernährungstherapie




Die PEG-Sonde (perkutane endoskopische Gastrostomie), ein künstlich von außen angelegter Zugang in den Magen, wird in den meisten Fällen zur Ernährung von Patienten, aber auch zur Verabreichung von Medikamenten, angelegt. Der austretende Kunststoffschlauch bleibt dauerhaft als Zugang liegen und muss häufig im nichtbestückten Zustand in den Behandlungspausen auf der Haut fixiert werden. Das Lösen und wieder Befestigen kann je nach Behandlung mehrmals täglich notwendig sein. Dies ist für die Patienten unangenehm und birgt Infektionsrisiken.

MediTex® hat für diese Patienten ein Unterhemd entwickelt, welches das Schlauchende in einer integrierten Tasche sicher verstaut. Zur Behandlung wird das Endstück herausgenommen und wie gewohnt desinfiziert und angeschlossen.

Das Unterhemd ist ebenfalls für PEJ anzuwenden.

Und es ist mit dem Shirt mit Eingriffstasche gut kombinierbar. Durch einen verdeckt angebrachten Schlitz hinter der Eingriffstasche können die Versorgungsschläuche diskret zum Körper geführt werden.

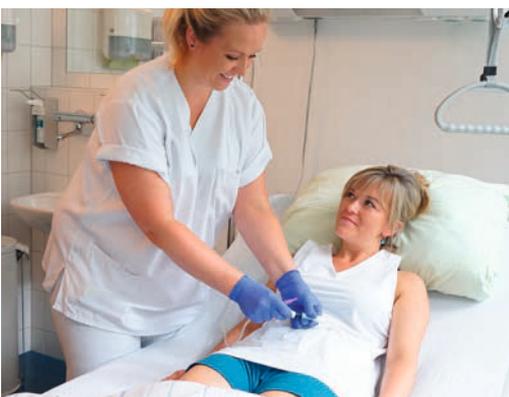

### Produktbeispiel:

- Shirt mit Eingriffstasche, Damen (Artikel-Nr.: 02.1.03.551)
- Herren (Artikel-Nr.: 02.2.03.551)
- kurze Hose (Artikel-Nr.: 06.4.11.151)



## PEG/PEJ-Unterhemd




MediTex® hat ein spezielles Unterhemd für Patienten mit PEG-bzw. PEJ-Sonden entwickelt. Es hat eine kleine schlitzförmige Öffnung zum Durchführen und Halten des Schlauches und eine kleine Tasche zum Verstecken des Endstücks während der Behandlungspausen. So muss dieses nicht mehr wie bisher am Körper mit einem Pflaster fixiert werden. Die Patienten können so einfacher den An- und Abschluss selbstständig, auch zu Hause, durchführen.

### Details zum Unterhemd:

- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Varianten: Damen (V-Ausschnitt); Herren (Rundhals)
- Größen: XS - XXL

### Handhabung des Unterhemdes:

1. Führen Sie das Schlauchende durch die Öffnung.
2. Zur weiteren Fixierung ziehen sie das Schlauchende durch die Lasche.
3. Verstecken Sie das Endstück in die dafür vorgesehene Tasche.

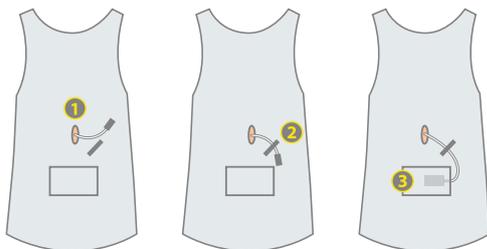

### Produktbeispiele:

- PEG/PEJ-Unterhemd, Damen (Artikel-Nr.: 01.1.04.551)  
Herren (Artikel-Nr.: 01.2.04.551)
- kurze Hose (Artikel-Nr.: 06.4.11.151)



## Shirt mit Eingriffstasche



Die versteckte Bauchöffnung am Shirt ermöglicht bei PEG/PEJ-Sondenträgern bzw. auch bei PD-Patienten eine unauffällige Bestückung der Sonden/Katheter. So können sich die betroffenen Patienten schnell und unkompliziert auch im Alltag versorgen.

Hinter der Bauchtasche befindet sich nämlich ein kleiner eingearbeiteter Schlitz durch den die Sonden/Katheterschläuche zum Körper geführt werden.

In der Bauchtasche können ebenso Insulin- oder Apomorphinpumpen verstaut werden. Diese sind so jederzeit diskret zu bedienen und zu kontrollieren, ohne sich entkleiden zu müssen.

---

### Details zum Shirt mit Eingriffstasche:

- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Varianten: Damen (V-Ausschnitt); Herren (Rundhals)
- Größen: XS - XXL



### Produktbeispiel:

- Shirt mit Eingriffstasche,  
Damen (Artikel-Nr.: 02.1.03.551)  
Herren (Artikel-Nr.: 02.2.03.551)
- kurze Hose  
(Artikel-Nr.: 06.4.11.151)





## MediTex® macht sich auch für kleine Patienten stark.



Die medizinische Versorgung von Kindern ist immer eine besondere Herausforderung. Die Kleidung von MediTex® ermöglicht, die kleinen Patienten so schonend wie möglich zu behandeln und die Angst vor unangenehmen Prozeduren zu minimieren.

Die Öffnungen sind auch hier, je nach Therapie, passgenau und auf die entsprechenden Körpergrößen ausgerichtet.



Um mit den Kindern unbeschwerter ins Gespräch zu kommen und ihr Vertrauen zu gewinnen hat MediTex® z.B. die Öffnung der Kleidung für Kinder mit einer PEG-Sonde hinter einer Applikation von MediMäx versteckt. Das niedliche Nilpferd öffnet, immer wenn es hungrig ist, weit sein Maul und legt die Zugänge frei. Danach schnappt die Klappe mit den Magnetverschlüssen wieder zu. Das mögen die Kinder besonders.



**Für Frühchen gibt es entsprechende Wäsche ab Größe 36.**



## Nachthemden

Die Öffnungsvarianten, die MediTex® in die diversen Shirts integriert hat, gibt es auch für Nachthemden. Passgenaue Öffnungen im Arm-/ Brust- oder Bauchbereich ermöglichen eine würdevolle und funktionale Behandlung. Die Nachthemden sind als Kurzarm- oder Langarm-Variante erhältlich. Die Nachthemden gibt es im Rückenbereich komplett offen, teiloffen oder geschlossen.



### Produktbeispiele:

- Nachthemd mit Brustöffnung,  
Langarm (Artikel-Nr.: 05.4.01.311)  
Kurzarm (Artikel-Nr.: 04.4.01.321)
- Nachthemd mit Bauchöffnung,  
Langarm (Artikel-Nr.: 05.4.09.511)  
Kurzarm (Artikel-Nr.: 04.4.09.511)

### Details zum Nachthemd

- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Größen: XS - XXL



## Multifunktions-Nachthemd

Die Öffnungsvarianten können auch im Nachthemd miteinander kombiniert werden, sodass MediTex® ebenso Multifunktions-Nachthemden in der Kollektion aufweist. Das Nachthemd mit den Brust- und Bauchöffnungen eignet sich besonders für Patienten mit Port-Katheter, Monitoring, zentralvenösem Katheter und Subclavia-Collier-Shunt. Speziell für Kliniken, welche diverse Patienten mit unterschiedlichen Indikationen versorgen eignen sich die multifunktionalen Nachthemden.

### Details zum Nachthemd

- Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort (Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
- Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
- In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
- Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
- Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
- Größen: XS – XXL



### Produktbeispiele:

- Multifunktional-Nachthemd  
Langarm (Artikel-Nr.: 05.4.08.411)
- Multifunktional-Nachthemd  
Kurzarm (Artikel-Nr.: 04.4.01.411.05)

## Auf einen Blick – die starken Produktlinien von MediTex®



<b>Produktion</b>	Deutschland	Ausland	Ausland
<b>Preis</b>	ab 57,94 € (netto)	ab 16,08 € (netto)	ab 28,69 € (netto)
<b>Lieferzeit</b>	max. 14 Tage	bis zu 10 Wochen	sofort
<b>Farbwahl</b>	petrol oder weiß	frei wählbar (individuelle Produktion)	türkis
<b>Bestellmenge</b>	ab 1 Stück	ab 300 Stück	1-300 Stück
<b>Verschlüsse (Knopf, Druckknopf, Reißverschluss, Magnet)</b>	wählbar	wählbar (Druckknöpfe empfohlen)	Druckknöpfe
<b>Umfang Sortiment</b>	gesamtes Sortiment	gesamtes Sortiment	ausgewähltes Sortiment
<b>Größen</b>	XS-XXL, genderspezifisch	XS-XXL, unisex	XS-XXL, unisex
<b>Sortiment Kinder</b>	ja	ja	nein
<b>Möglichkeit Branding</b>	nein	ja	nein



- höchste Qualität
- großes Sortiment
- geringe Bestellmenge möglich

- großes Sortiment
- individuelle Produktion
- eigene Farbwahl und Branding möglich
- ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

- schnelle Lieferung
- gutes Preis-/Leistungsverhältnis

# MEDITEX®

Medizinische Funktionswäsche



## Größentabelle

### DAMEN

Maßstabelle	XS	S	M	L	XL	XXL
Rückenlänge	57,5 cm	59,5 cm	62,0 cm	64,7 cm	67,1 cm	69,6 cm
Oberweite	38,0 cm	42,0 cm	46,0 cm	50,0 cm	55,0 cm	60,0 cm
Saumweite	40,0 cm	44,0 cm	48,4 cm	52,3 cm	57,9 cm	62,9 cm
Schulterbreite	10,8 cm	11,3 cm	11,6 cm	12,3 cm	13,4 cm	13,9 cm
Ärmellänge Langarm	58,5 cm	59,5 cm	60,5 cm	61,5 cm	62,5 cm	63,5 cm

### HERREN

Maßstabelle	XS	S	M	L	XL	XXL
Rückenlänge	65,3 cm	66,3 cm	67,3 cm	68,3 cm	69,3 cm	70,3 cm
Oberweite	44,2 cm	47,2 cm	50,2 cm	53,3 cm	56,3 cm	59,3 cm
Saumweite	44,5 cm	47,5 cm	50,4 cm	53,7 cm	56,7 cm	59,7 cm
Schulterbreite	10,7 cm	11,0 cm	11,2 cm	11,5 cm	12,0 cm	12,4 cm
Ärmellänge Langarm	61,4 cm	62,4 cm	63,4 cm	64,4 cm	65,5 cm	66,4 cm

Die speziell entwickelte Patienten-Bekleidung von **MediTex®** ermöglicht durch passgenaue wiederverschließbare Öffnungsvarianten einen schonenden und zeitsparenden Zugriff durch das Personal während der Behandlung. Hygienische Richtlinien können leichter eingehalten und Risiken somit minimiert werden. Die Patienten empfinden die Wahrung der Intimität als angenehm und ihr Wohlbefinden wird maßgeblich gesteigert.

# MEDITEX®

Medizinische Funktionswäsche

<b>MediTex®</b>	mobil	+49 162 2907453
Medizinische Funktionswäsche GmbH	fon	+49 381 44448159
Schillingallee 68	fax	+49 381 44453460
18057 Rostock	mail	info@medi-tex.de

[www.medi-tex.de](http://www.medi-tex.de)

MediTex® wird gefördert durch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung.



**EUROPÄISCHE UNION**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung

**Mecklenburg  
Vorpommern**   
*MV tut gut.*